

JOGGR KIT



Trekk den ene "snap-lock" låsepinnen ut slik at ett endestykke av joggegaffelen kan føres inn i aluminiums rammen av vognen.
MERK: Sporene til å sette hjulet inn i skal peke nedover. Gjenta på motsatt side.



Hjulet festes til joggegaffelen etter at denne er festet til vognen. Løsne skruen på hjulets akselbolt slik at hjulet enkelt kan føres inn i sporene på joggegaffelen.



Ved behov for å justere rullestanden i hjulet kan dette normalt justeres ved å løsne mutrene på hver side av hjulets akselbolt – se bildet. Det er tre muttere på hver side av hjulet. De to innerste mutrene løsnes litt – nok til at hjulet triller lett. "Lås" deretter den innerste mutteren fast ved å stramme den ytre av de to mutrene mot den innerste mutteren.



Ved behov for justering retningen av joggehjulet, sitter det en vingemutter på joggegaffelen. Løsne joggehjulet ved å åpne hurtigkoblingen og juster deretter med vingemutteren. Fest fast hurtigkoblingen.



Sikkerhetsreim er viktig å bruke når man triller.



Trykk med tommelen på den svarte knappen på enden av akselbolten. Før bolten inn i rammen. Slipp knappen mens du skyver hjulet inn til du hører at akselbolten klikker på plass.



ADVARSEL

Påse at tuppene på "snap-lock" låsepinnene (rød tupp) er synlig på utsiden av aluminiums rammen av vognen. Dette sikrer at joggeaffelen er låst fast til vognen. Bruk alltid sikkerhetsreim når vognen brukes som joggevogn.